

簡単！迅速！安心！

誰でも

使える

救急止血パッド



救急時止血用パッド「止血・AID」とは？

ニーズ

大規模な自然災害や大事故により負傷者が発生した場合、医療機関に搬送されるまでの間に、迅速かつ効果的な止血を施す事が人命救助の観点において非常に重要であり、緊急時には、近くにいる人が一刻も早く止血手当てを施すことが必要です。災害が発生した際、専門的な知識がない人にも簡単に使え、迅速で効果的な止血ができる止血用具として活躍が期待されるのが、救急止血パッド「止血・AID」です。

市場・競合品

現在、止血用具としては三角巾・ガーゼ・包帯が普及しています。しかし、これらの止血用具では、専門的な知識が必要で、一般の人々には困難と言われております。各種災害が発生した際、家族はもちろん、企業・学校・公共施設・陸海空の交通機関等での対策が必要です。薬剤を使用していない止血用具としての類似品が少なく、独特の製品特性を持つ救急止血パッドが「止血・AID」です。海外では「J・PAD」とし販売してます。

特徴・強み

1. 取り扱いが簡単……止血している箇所にあてて、手のひらのほかテープや包帯で固定するだけ
2. 薬剤を使用していない……副作用の心配がない
3. 迅速な止血……ガーゼに比べ迅速な止血を可能にする
4. 傷口にダメージを与えない……湿潤環境を整えており、剥がす時に傷口にダメージを与えない
5. 二次感染防止……バックフィルムにより、負傷者の体液がつかない
6. 安心・安全……滅菌済みで衛生的、医療機器として届出済

止血・AIDの特徴

薬剤を使用していない

副作用の心配がなく、
誰でも使用できる

迅速な止血

ガーゼに比べ
迅速な止血が可能

取扱いが簡単

止血部分に当てて
テープや包帯で固定するだけ
専門知識が要らない



傷口にやさしい

湿潤環境を維持するため、
剥がしたときに傷口に
ダメージを与えない

二次感染リスク軽減

防水性バックシートにより、
負傷者の体液が介助者に
直接触れない

安全・安心

滅菌済みなので衛生的
医療機器として届出済み

低価格

他の救急用止血パッドに
比べて、価格が安い

血液の組成と凝固



血清

- 淡黄色、透明の液体
- 血漿からフェブリノーゲンを除いたもの
- 約90%が水分で、血液凝固に関与しない


血餅

- 血液が凝固して出来る暗赤色 餅状の凝塊
- フィブリンの細かい網に赤血球、白血球、血小板が絡まって出来る
- 約90%が赤血球

止血・AIDは、血液凝固メカニズムの研究から生まれた止血用具です。

「止血・AID」の構造


- パルプ綿を用いたユニークな3層構造
- 血液中の水分(血清)を不可逆的に分離吸収させ、赤血球や血小板等の濃度を高め、血餅を生じさせ止血

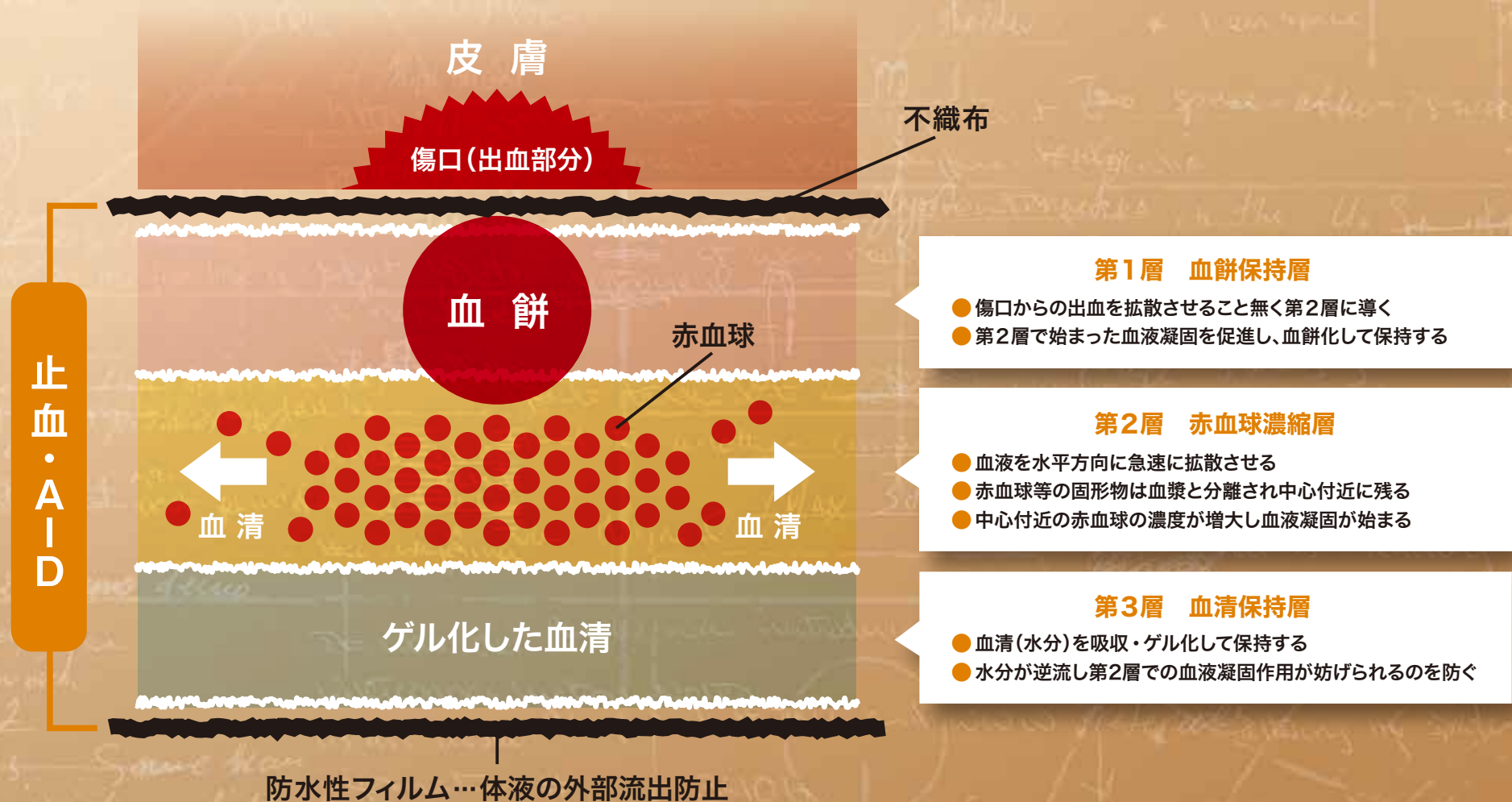

使用方法と注意事項


止血用パットの取り出し

外装袋を切り口から破り、滅菌バッグを取り出し、滅菌バッグの上部を引きはがし「止血用パッド」を取り出してください

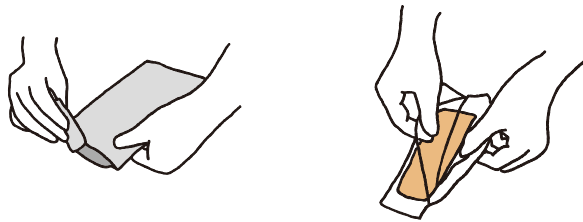

傷口へのあて方・固定の仕方

白い不織布面を出血部にあて、手のひらのほか、テープや包帯でしっかり固定して下さい

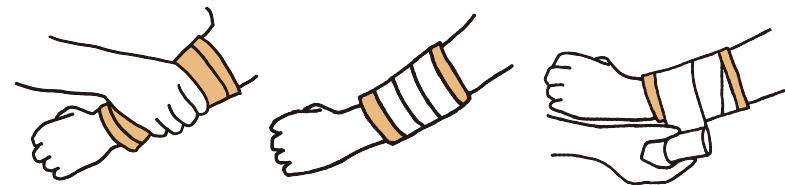

手のひらで

テープで固定

包帯で固定

使用上の注意

- 創傷部の大きさや出血量等によって止血できない場合があります。
- 創傷部の観察を十分に行い出血量や創傷部の状態に応じ、適切に交換及び処置を行い早急に専門医の治療を受けてください。
- 本製品は傷等を治すものではなく、一時的に出血を行うものです。
- 傷の大きさより大きいサイズの製品を使用してください。
- 本製品は使い捨てです。一度使用したものを再利用しないでください。
- 滅菌バッグに汚れ、破損、水漏れが認められる場合使用しないでください。
- 滅菌効果が損なわれるため、滅菌バッグは使用時に開封してください。

保管上の注意

- 水濡れに注意し、直射日光及び火気を避けて湿気の少ない清潔な所に保管してください。
- 化学薬品保管場所、その他ガスの発生する場所を避けて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

製品仕様

アルミ外袋入り(M)

- 価格：1枚 1,100円(税込)
- 寸法：130×180mm
(アルミ外装寸法 140×200mm)
- 重量：24g
- 個装：1枚/袋
- 使用期限：製造月から5年



箱売り

- 梱包箱 外寸サイズ
外箱：W330×H440×D470mm
内箱：W150×H210×D310mm
- 入数、重量(1ケース)
外箱：300枚入り(内箱3個×2段)、約8.5kg
内箱：50枚入り、約1.2kg

滅菌パック(M)

- 価格：1箱(400枚入)
286,000円(税込)
※外箱入り単位
- 寸法：130×180mm
- 重量：9g
- 個装：1枚/袋
- 使用期限：約3年



箱売り

- 梱包箱 外寸サイズ
外箱：W245×H470×D500mm
内箱：W225×H225×D120mm
- 入数、重量(1ケース)
外箱：400枚入り(内箱4個×2段)、約7.5kg
内箱：50枚入り、約0.8kg

会社概要

会 社 名	川口印刷工業株式会社
本 社 所 在 地	〒020-0841 岩手県盛岡市羽場10地割1番地2 TEL.019-632-2211 FAX.019-632-2217
代 表 者 名	代表取締役社長 斎藤 誠
創 業	明治37年 10月
設 立	大正3年 7月 28日
資 本 金	3,000万円
決 算 期	6月
従 業 員 数	160名 (2020年 12月現在)
支 店・営 業 所	東京、仙台、青森、八戸、秋田
H P	https://kpj.co.jp